


Endostar EASYdam

Make it EASY

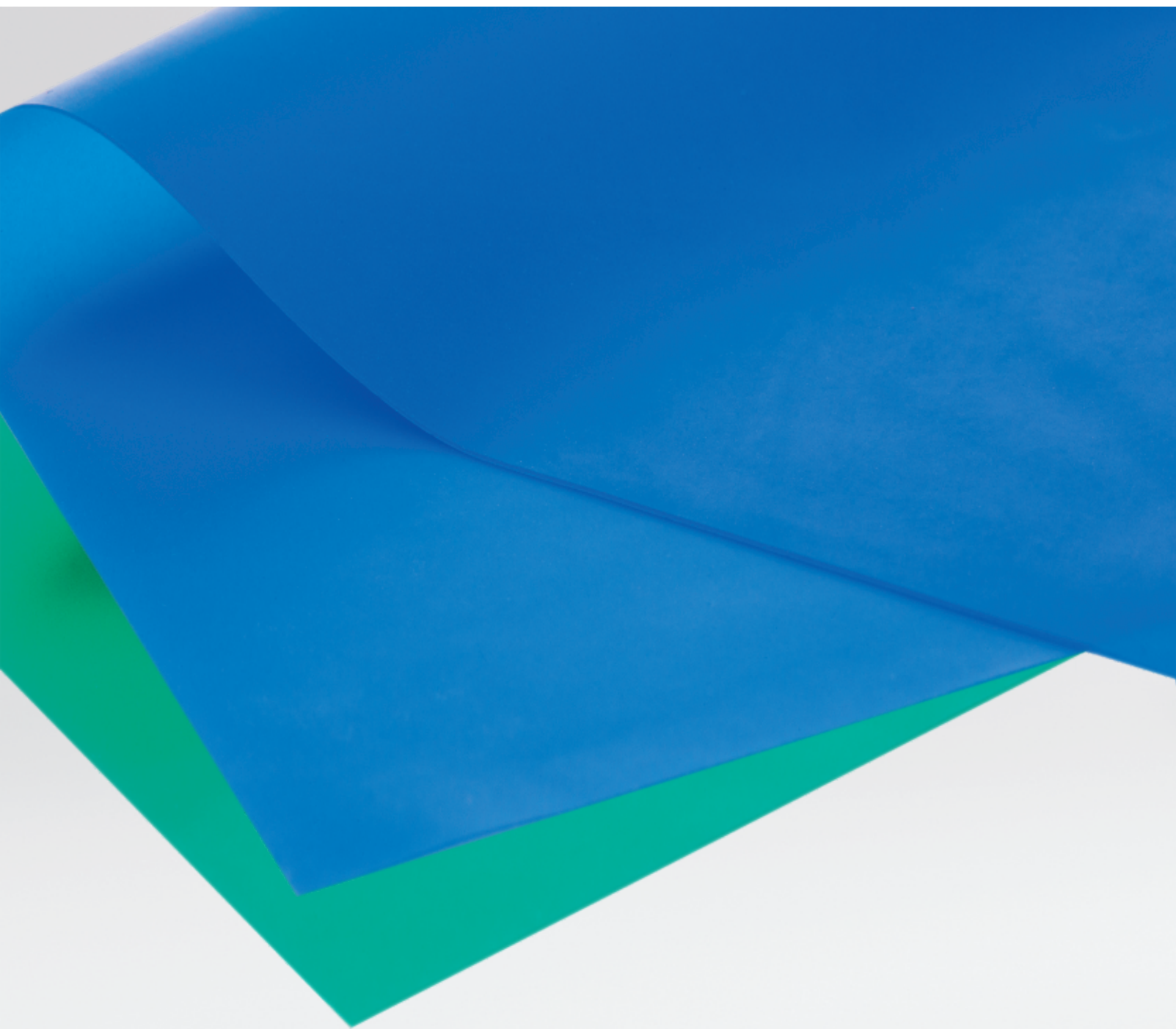

www.poldent.pl

endo★star

Endostar EASYdam

Endostar EASYdam

Lateksowy bezpudrowy koferdam, niezwykle wytrzymały i sprężysty, zapewniający wysoki komfort pacjentowi. Bardzo elastyczny i odporny na rozerwanie. Dostępny w 3 grubościach (cienki, średni, gruby) oraz dwóch kolorach (niebieski i zielony). Bezzapachowy i łatwy w aplikacji.



Endostar EASYdam Non-latex

Bezlataksowy, bezpudrowy koferdam o zwiększonej elastyczności niż tradycyjny koferdam lateksowy. Niezwykle łatwy w aplikacji dzięki maksymalnej rozciągliwości. Bezzapachowy i bez posmaku lateksu. Przylega ściśle do zęba i nie transportuje alergenów.

Endostar EASYdam Clamps

Wysokiej jakości klamry do koferdamu ze skrzydełkami. Matowe wykończenie zapewnia wygodną pracę bez efektu refleksów. Rozwiązanie szczególnie przydatne w pracy pod mikroskopem. Wysokogatunkowa stal użyta do produkcji klamer zapewnia dużą odporność na zużycie oraz wytrzymałość zmęczeniową.

Uniwersalne



#9

Siekacze i małe kły

Zęby trzonowe



#12A

Dolne prawe i lewe
górne trzonowce



#13A

Dolne lewe i prawe
górne trzonowce



#7

Dolne zęby
trzonowce

Zęby przedtrzonowe



#2

Większe zęby
dwuguzkowe



#2A

Zęby
dwuguzkowe



#8A

Górne zęby
trzonowce



#3

Małe zęby
trzonowce



#14A

Częściowo wyrżnięte, duże,
zaklinowane zęby trzonowce

Akcesoria EASYdam



Endostar EASYdam Frame

Metalowa ramka dla dorosłych w kształcie litery U.



Endostar EASYdam Punch

Dziurkacz do koferdamu typu Ainsworth.



Endostar EASYdam Forceps

Wygodne kleszce do koferdamu.




Endostar EASYdam fix

Elastyczne gumki zaciskowe będące alternatywą lub uzupełnieniem tradycyjnych klamer.



Endostar EASYdam Template

Plastikowy, trwały szablon do koferdamu pomagający w dokładniejszym oznaczeniu pozycji zębów na gumie koferdamu.

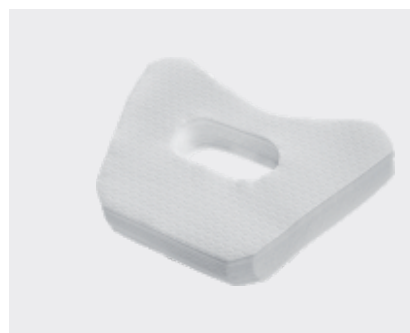


Endostar EASYdam Napkins

Podkładki pod koferdam, pochłaniają wilgoć i ochraniają delikatną skórę.

Krok po kroku



Proste znakowanie dzięki przejrzystemu szablonowi Endostar EASYdam Template.

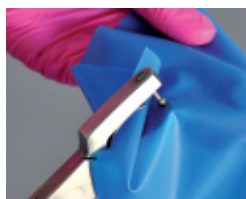

Ostry dziurkacz Endostar EASYdam Punch dziurkuje otwór dokładnie dobranej wielkości.



Umieść klamrę Endostar EASYdam Clamp w koferdamie za pomocą kleszczy Endosatr EASYdam Forceps.



Umieść klamrę z koferdammem na zębie i rozciągnij na ramce.



Gumki zaciskowe Endostar EASYfix są uzupełnieniem lub alternatywą tradycyjnych klamer.

Informacje dla zamawiających



EASYdam - gumy lateksowe dla dorosłych

EEDLM36G	152 x 152 mm, średni, bezzapachowy, zielony, 36 szt.
EEDLH36G	152 x 152 mm, gruby, bezzapachowy, zielony, 36 szt.
EEDLT36G	152 x 152 mm, cienki, bezzapachowy, zielony, 36 szt.
EEDLM36B	152 x 152 mm, średni, bezzapachowy, niebieski, 36 szt.

EASYdam NON LATEX - gumy bezlateksowe dla dorosłych

EEDNLM15P	150 x 150 mm, średni, bezzapachowy, fioletowy, 30 szt.
------------------	--

Endostar EASYdam Clamp - matowe klamry ze skrzydełkami

EEDC9	#9	EEDC14A	#14A
EEDC2	#2	EEDC7	#7
EEDC2A	#2A	EEDC3	#3
EEDC12A	#12A	EEDC8A	#8A
EEDC13A	#13A		

Endostar EASYdam Frame

EEDFR	Metalowa ramka dla dorosłych, 1 szt.
--------------	--------------------------------------

Endostar EASYdam Punch

EEDP	Dziurkacz, 1 szt.
-------------	-------------------

Endostar EASYdam Forceps

EEDFO	Kleszcze, 1 szt.
--------------	------------------

Endostar EASYdam Template

EEDT	Szablon do koferdamu, 1 szt.
-------------	------------------------------

Endostar EASYdam Napkins

EEDN50	Podkładki pod koferdam, 50 szt.
---------------	---------------------------------

Endostar EASYfix - gumki stabilizujące

EEDEFS	Ø 1,5 mm, żółte, small, długość: 4 m, 1 szt.
EEDEFL	Ø 2,0 mm, pomarańczowe, large, długość: 4 m, 1 szt.

Ver. 2, maj 2023

Poldent sp. z o.o.
 ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa
 Tel.: 22 351 7 650 - 651, Fax: 22 351 7 679
 E-mail: poldent@poldent.pl
 www.poldent.pl

endo★star